


Charakteristika péřového bederního pásu:

- univerzální bederní pás je vhodný pro muže i ženy, štíhlé i silnější
- je tvořen vnějším prátelným povlakem a vnitřní neprátelnou péřovou vložkou
- je prodyšný a udržuje tzv. suché teplo - pohlcuje a odvádí vlhkost
- vhodný pro celodenní použití, přes den i v noci
- prohřívá rizikové spodní partie zad i břicha
- vhodný pro použití při různých činnostech - práce, sport, odpočinek apod.
- do vnitřní vložky je použito hygienicky ošetřené prachové husí peří
- na všechny látkové části výrobku je použita textilie ze 100% bavlny

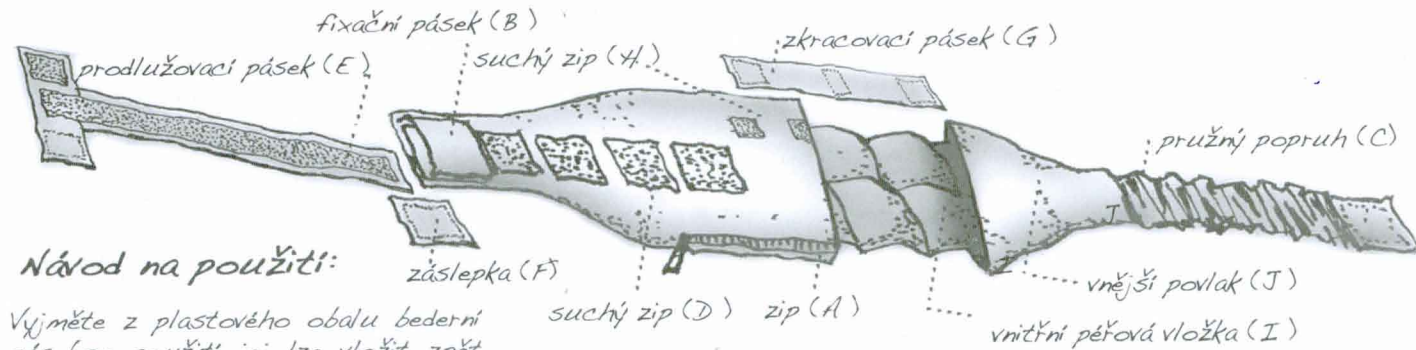

Návod na použití:

Vyjměte z plastového obalu bederní pás (po použití jej lze vložit zpět a takto skladovat).

Přiložte jej plochou částí k dolní části zad tak, aby zip (A) tvořil spodní okraj výrobku a strana bez suchých zipů se dotýkala těla.




Otevřete na přední části bederního pásu průchodový fixační pásek (B), pak k přední části těla přitáhněte zprava doleva pružný popruh (C), který zafixujete podle potřeby k suchému zipu (D). Zavřete fixační pásek (B).

Pro silnější postavy

Lze obvod pásu zvětšit prodlužovacím páskem (E). Ten se uchytí na vnitřní část bederního pásu po odstranění textilní čtvercové zásepky (F). Přitážení k tělu probíhá shodným způsobem jako při klasickém postupu.

Pro štíhlé postavy

nebo pro lepší přilnavost bederního pásu v jeho horní části k tělu je možné použít zkracovací pružný pásek (G), kterým lze zkrátit podle potřeby horní obvod bederního pásu. Zkracovací pásek natáhněte a přimáčkněte na suché zipy (H). Čím větší natažení, tím menší obvod pásu.

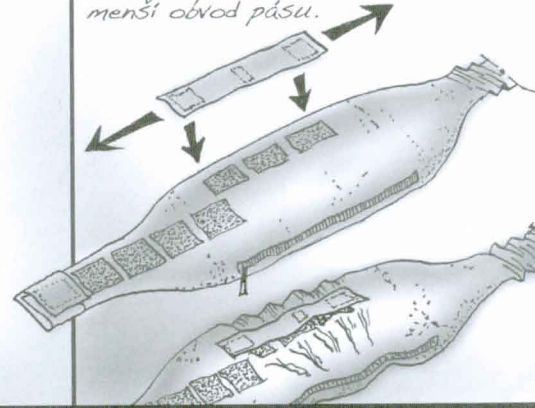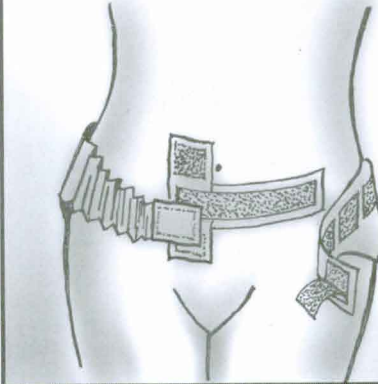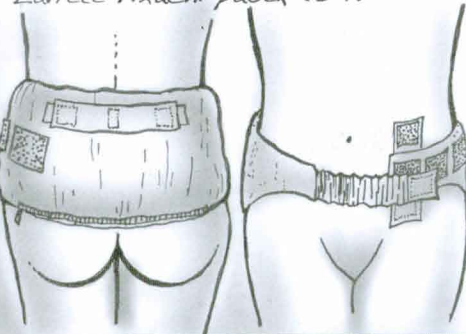

Pokud je potřeba vyprat vnější látkový povlak bederního pásu (J), pak rozepněte zip ve spodní části bederního pásu (A) a vyjměte vnitřní péřovou vložku (I).

Perte maximálně při teplotě 30°C. (viz vyznačené prací symboly)

Pás perte v zapnutém stavu, aby háčky suchého zipu nepoškodily látku nebo gumy bederního pásu, popř. ostatní prádlo v pračce.

Vnitřní péřovou vložku se prát nedoporučuje, aby nedošlo k jejímu poškození. Pokud bude vnitřní vložka přesto vyprána, je důležité, aby byla velmi kvalitně vysušena. (peří může práním ztrácet své tepelně-izolační vlastnosti)

Při zdravotních problémech se o vhodnosti použití péřového bederního pásu poraďte se svým ošetřujícím lékařem. Péřový bederní pás je určen pro dospělé, není hračkou pro děti.

Záruka na výrobek je 24 měsíců.

Při reklamaci lze kontaktovat bezplatnou infolinku 800 100 488, zároveň uschovejte doklad o zaplacení výrobku a potvrzení výstupní kontroly

Výrobce: Miloš Mareš, Tyršovo náměstí 456, Milevsko 399 01, Česká republika

Výrobek je chráněn u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Výstupní kontrola

zn..... podpis.....

Česká firma Miloš Mareš - péřové výrobky vám dále nabízí:

- výroba a prodej péřových dek a polštářů klasické rozměry i na zakázky

- renovace starých péřových výrobků ze starých peřin, dek a polštářů uděláme nové (včetně čištění peří)

- výběr ze 14 barev sypaniny

- při výrobě se používají výhradně atestované látky

- síť smluvních poboček po celé České republice, kde lze výrobky objednat

- bližší informace na bezplatné infolince 800 100 488 (PO - PÁ 8.30 - 17.00)

www.peri-mares.cz

